


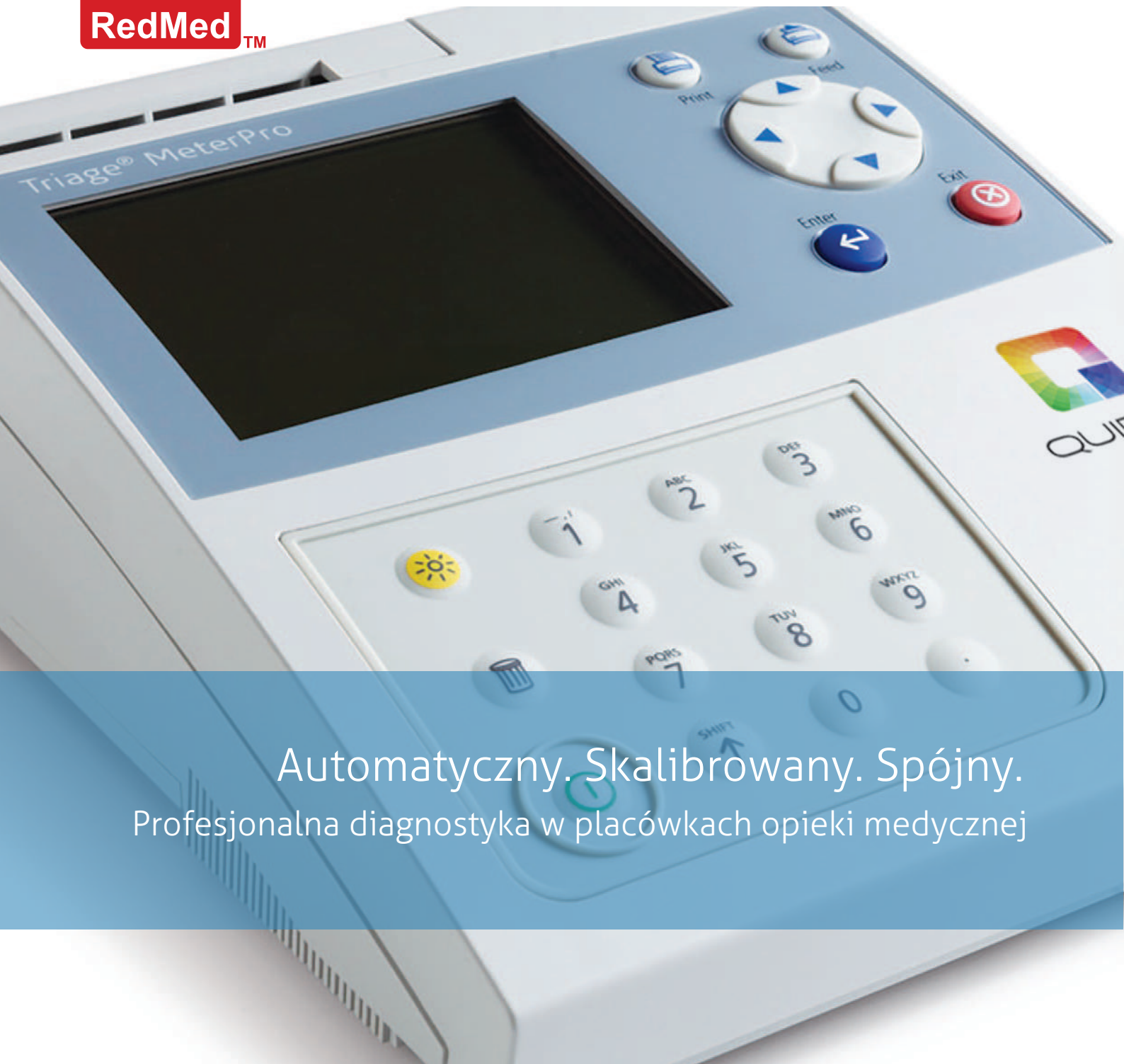

RedMed™

System Triage firmy Quidel



Automatyczny. Skalibrowany. Spójny.
Profesjonalna diagnostyka w placówkach opieki medycznej




Triage®

System Triage firmy Quidel

Czas oczekiwania na wynik ilościowy to ok. 15-20 min.*

Analizator Triage firmy Quidel wykorzystywany jest w tysiącach placówek opieki zdrowotnej na całym świecie. Obszerny wybór testów umożliwia kompleksową diagnostykę, której potrzebujesz, aby podejmować szybkie i trafne decyzje terapeutyczne w gabinecie lekarskim (POC).

*nie dotyczy testów TOX Drug Screen

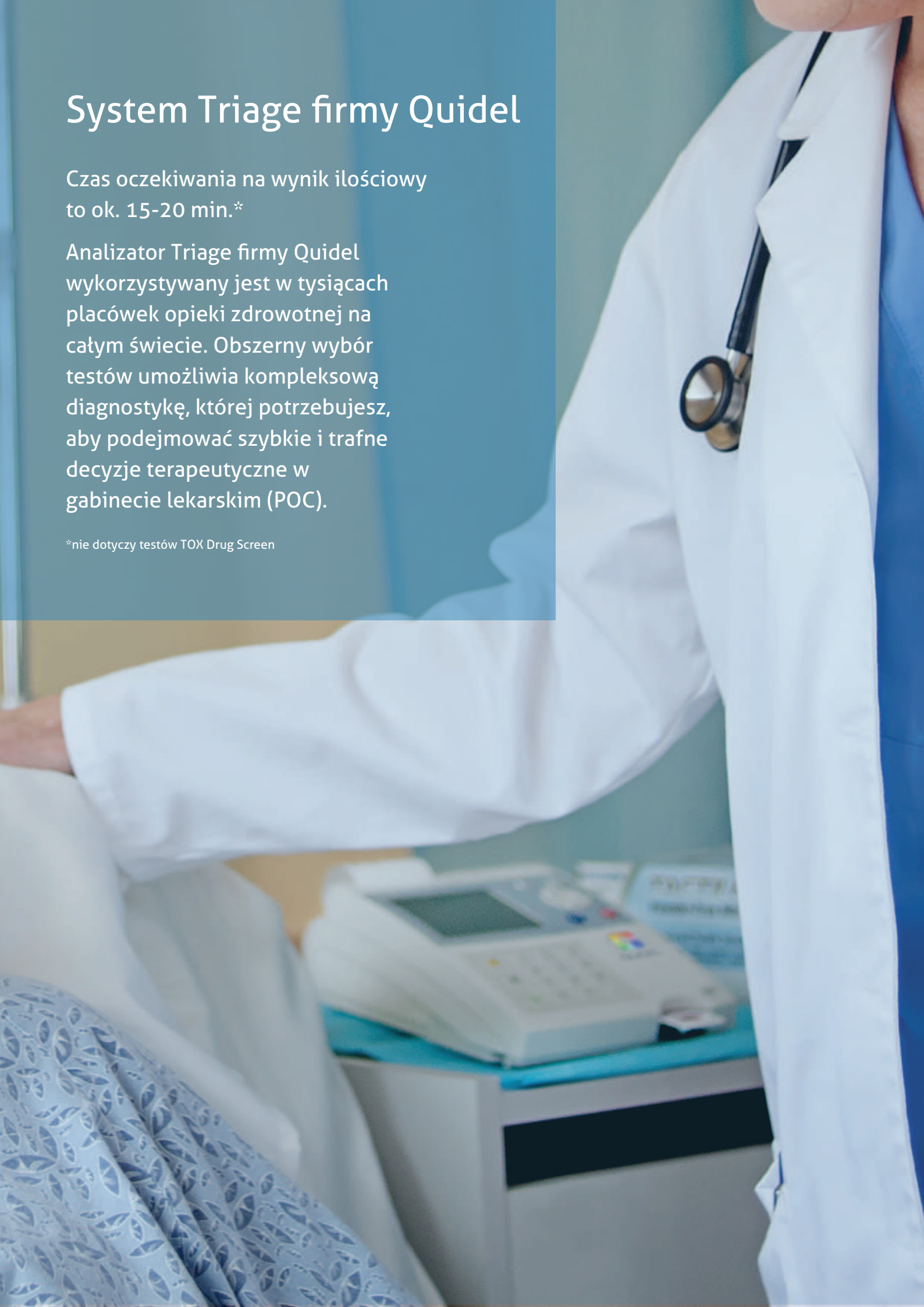


Układ sercowo-naczyniowy

System Triage firmy Quidel może przyspieszyć podejmowanie decyzji w najbardziej krytycznych warunkach, przy wystąpieniu niewydolności serca, ostrego zespołu wieńcowego, zawału mięśnia sercowego i zdarzenia zakrzepowo-zatorowego.



Zakres pomiaru						
Test/Panel Testowy	Mioglobina	CK-MB	Troponina I	BNP	D-dimer	NT-proBNP
Quidel Triage Cardiac Panel	5-500 ng/mL	1,0-80 ng/mL	0,05-30 ng/mL			
Quidel Triage Profiler SOB™ Panel	5-500 ng/mL	1,0-80 ng/mL	0,05-30 ng/mL	5-5000 pg/mL	100-5000 ng/mL	
Quidel Triage Troponin I Test			0,01-10 ng/mL			
Quidel Triage Cardio2 Panel			0,01-10 ng/mL	5-5000 pg/mL		
Quidel Triage Cardio3 Panel		1,0-80 ng/mL	0,01-10 ng/mL	5-5000 pg/mL		
Quidel Triage BNP Test				5-5000 pg/mL		
Quidel Triage NT-proBNP Test						20-35000 pg/mL
Quidel Triage D-Dimer Test					100-5000 ng/mL	

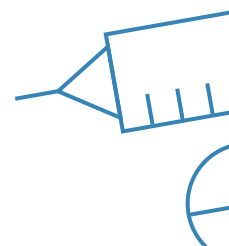




Łatwa procedura pomiaru

1

Dodaj próbkę pacjenta za pomocą pipety dołączonej do każdego zestawu.

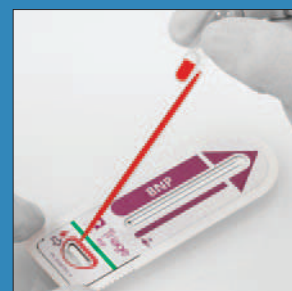

Test TOX Drug Screen

Test przesiewowy, który zapewnia jednoczesne, jakościowe oznaczenie obecności leku i / lub głównych metabolitów, powyżej stężenia progowego dla 10 różnych klas leków (11 unikalnych testów) w moczu.

Stężenia progowe do oznaczania leków

Acetaminofen/Paracetamol	APAP	5 µg/mL
Amfetamina	AMP	1000 ng/mL
Methamfetamina	mAMP	1000 ng/mL
Barbiturany	BAR	300 ng/mL
Benzodiazepiny	BZO	300 ng/mL
Kokaina	COC	300 ng/mL
Metadon	MTD	300 ng/mL
Opiaty	OPI	300 ng/mL
Fencyklidyna	PCP	25 ng/mL
THC	THC	50 ng/mL
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne	TCA	1000 ng/mL

2

Włóż test do analizatora Triage firmy Quidel.



3

Odczytaj wyniki na ekranie lub naciśnij „Drukuj”, aby wydrukować.





Jakość jak w laboratorium

- Wyniki w 15-20 minut.
- Wbudowana Kontrola Jakości w analizatorze, oprogramowaniu i testach.
- Kalibracja testu odbywa się za pomocą CODE CHIP™, który jest określony dla każdej partii testów.
- Dostępna jest również Zewnętrzna Kontrola Jakości QC.
- Posiada zabezpieczenie dla ID operatora i QC.
- Wykonywanie seryjnych pomiarów jest możliwe z użyciem kilku urządzeń przy założeniu, że pomiar zostanie wykonany w ciągu 30 minut od zaaplikowania próbki.
- Można zbadać próbki z krwi pełnej, osocza lub moczu.

Prosta obsługa, niskie koszty użytkowania

- Nie wymaga specjalnego szkolenia.
- Posiada czytnik kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta i operatora.
- Nie wymaga konserwacji, jedynie wymiany papieru i baterii oraz okresowego czyszczenia zewnętrznego.
- Wyniki ilościowe są wyświetlane i drukowane w postaci danych liczbowych. Gdy wynik jest powyżej wartości oczekiwanej jest on podświetlony*.
- Wyniki jakościowe są wyświetlane i drukowane. Oznaczone są skrótem (POS) jako pozytywne lub (NEG) jako negatywne, eliminując w ten sposób potrzebę własnej interpretacji wyników.

* nie dotyczy testów D-Dimer

Łączność za pomocą oprogramowania Triage Census® firmy Quidel (ATM)

- Kompleksowe oprogramowanie umożliwia monitorowanie i zarządzanie wynikami Systemu Triage, dostarcza raporty z danymi, kontroluje analizator i użytkowników oraz przeprowadza analizę QC.
- Interfejs może być używany do komunikacji z systemami innych producentów.

System Triage firmy Quidel został zaprojektowany, aby zapewnić wyniki w szybki i łatwy sposób.

- Panele testowe są dostosowywane do potrzeb klienta dzięki funkcji Test Select™ (wybór rodzaju testu zgodnie z wymaganiami).
- Wyeliminowanie subiektywnych opinii diagnostycznych a uzyskanie obiektywnych danych w zautomatyzowanym systemie Triage, co przyspiesza podejmowanie trafnych decyzji diagnostycznych.
- Szybszy czas uzyskiwania wyników przyczynia się do szybszej diagnostyki pacjenta, skrócenia czasu pobytu w szpitalu i zwiększenia wydajności oddziału ratunkowego.

Lista produktów systemu Triage firmy Quidel

Produkt	Ilość	Numer Katalogowy
Testy i Kontrole		
Quidel Triage Cardiac Panel*	25 sztuk	97000HSEU
Quidel Triage Profiler SOB™ Panel*	25 sztuk	97300EU
Quidel Triage BNP Test*	25 sztuk	98000XREU
Quidel Triage D-Dimer Test*	25 sztuk	98100EU
Quidel Triage Total 5 Kontrola 1	5 fiolek (5x0.25 mL)	88753
Quidel Triage Total 5 Kontrola 2	5 fiolek (5x0.25 mL)	88754
Quidel Triage Troponin I Test*	25 sztuk	98600EU
Quidel Triage Cardio2 Panel*	25 sztuk	97500EU
Quidel Triage Cardio3 Panel*	25 sztuk	97400EU
Quidel Triage Total 3 Kontrola 1*	5 fiolek (5x0.25 mL)	88733
Quidel Triage Total 3 Kontrola 2*	5 fiolek (5x0.25 mL)	88734
Quidel Triage NT-proBNP Test*	25 sztuk	98700EU
Quidel Triage NT-proBNP Kontrola 1*	5 vials (5x0.25 mL)	98713EU
Quidel Triage NT-proBNP Kontrola 2*	5 vials (5x0.25 mL)	98714EU
Quidel Triage TOX Drug Screen*	25 sztuk	94400EU
Quidel Triage TOX Drug Screen Kontrola 1	5 fiolek (5x0.25 mL)	94413
Quidel Triage TOX Drug Screen Kontrola 2	5 fiolek (5x0.25 mL)	94414
Przyrządy i akcesoria		
Quidel Triage MeterPro	1 sztuka	55071
Quidel Triage MeterPro Czytnik kodów kreskowych	1 sztuka	52142
Quidel Triage MeterPro Y-Adapter	1 sztuka	52098
Quidel Triage Papier do drukarki	1 sztuka	52031
Quidel Triage Supervisor Czip kodujący	1 sztuka	80035
Oprogramowanie Quidel Triage Census	Zestaw	55069

* Niedostępne w sprzedaży w USA



Red Med Poland Sp. z o. o.
 Infolinia: 801 011 041
 Warszawa: 22 244 25 90
 Chorzów: 32 249 00 70
www.redmed.pl
bok@redmed.pl